



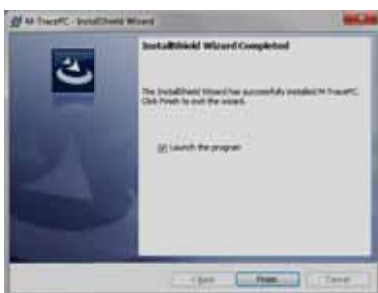



1. INSTALLATION DE VOTRE ECG-PC EOLYS :

1.1. LOGICIEL M-TRACE PC FOURNI AVEC L'ECG

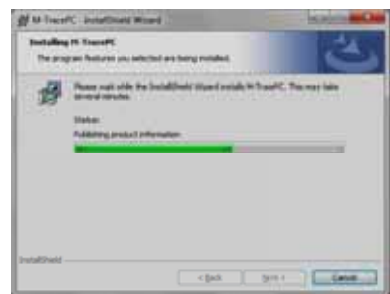

1.2. DONGLE USB BLUETOOTH NOIR FOURNI AVEC L'ECG

- Connectez simplement votre dongle USB dans un port USB de votre ordinateur.
- Windows effectue la reconnaissance automatique du périphérique et l'installe :

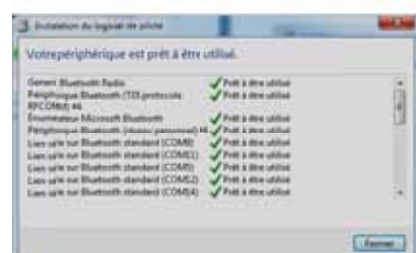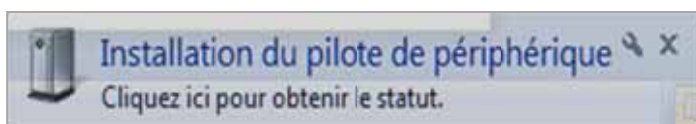

1.3. DONGLE USB D'ANALYSE HES BLEU FOURNI AVEC L'ECG

- Connectez simplement votre dongle USB dans un port USB de votre ordinateur.
- Windows effectue la reconnaissance automatique du périphérique et l'installe :




1.4. JUMELAGE DE VOTRE ECG AVEC VOTRE OS WINDOWS

- Repérez l'icône Bluetooth dans la barre des tâches de Windows :



- Faites un clic droit sur cet icône et choisissez « Ajouter un périphérique »
- Sélectionnez **M-ECG** n° XXXX et cliquez sur suivant ; rentrez le code « **1234** »

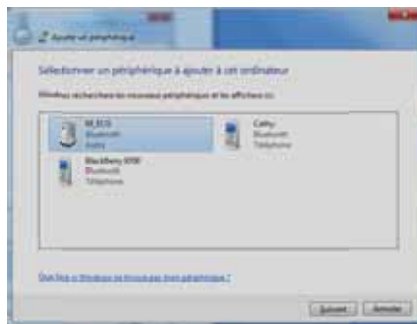


1.5. CONNEXION DE VOTRE ECG DANS LE LOGICIEL M-TRACE PC

- Allumez votre boîtier ECG et assurez-vous que le voyant flashe en vert,
- Dans le logiciel M-Trace, cliquez sur « Réglages – Réglages communication »,
- Sélectionnez « M-ECG » ou « M-TracePC » n°xxxx puis « Test de connexion » :




- Et avoir un message confirmant la bonne communication comme ceci :

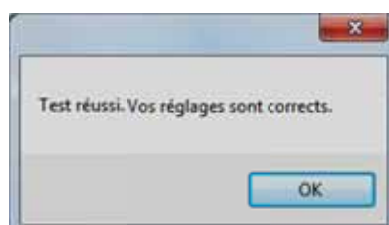

2. UTILISATION DE VOTRE ECG-PC EOLYS :

2.1. CREATION DE LA FICHE PATIENT

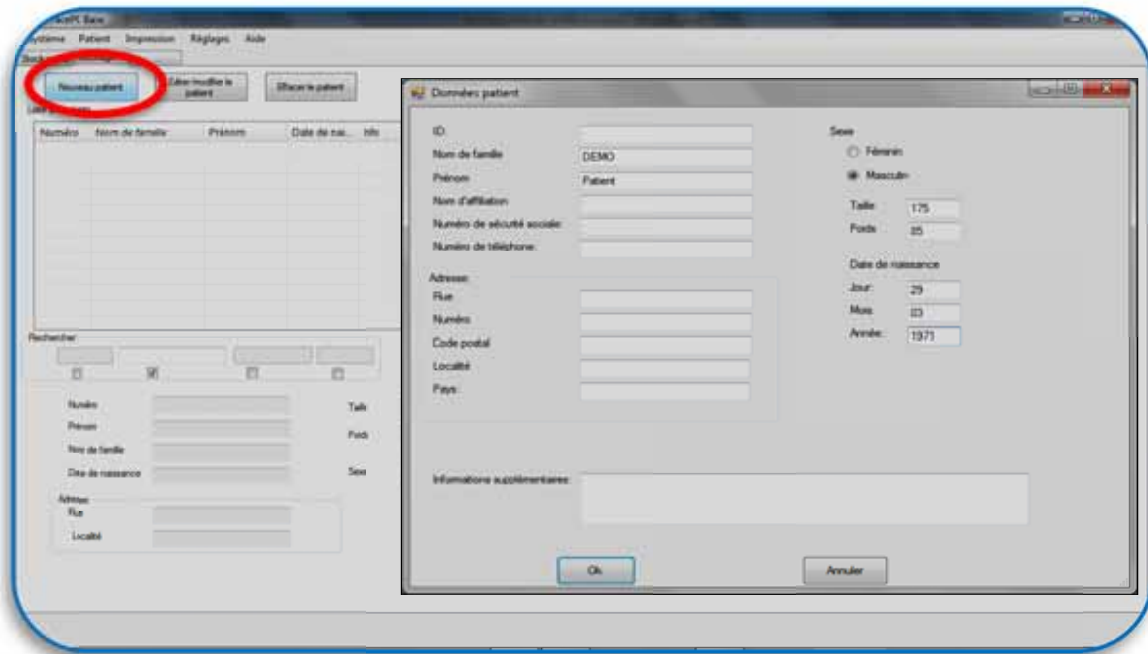

2.2. CONNEXION CABLE OU CEINTURE SUR L'ECG + APPAREILLAGE PATIENT




- 2.3. APPUI SUR LE BOUTON DE L'ECG POUR TRANSMETTRE LE SIGNAL
- 2.4. DANS M-TRACE PC : APPUI SUR LE BOUTON « NOUVEL EXAMEN »
- 2.5. SCOPE / AFFICHAGE DE 12 DERIVATIONS EN DIRECT A L'ECRAN
- 2.6. ACQUISITION DE L'EXAMEN, EN CLIQUANT SUR « START »
- 2.7. ENREGISTREMENT DE 10 SEC. EN AUTOMATIQUE OU MANUEL
- 2.8. POUR VOIR L'EXAMEN ACQUIS, APPUYEZ SUR « REVOIR EXAMEN »



- 2.9. PROFITEZ DES FONCTIONS DU LOGICIEL COMME LE « ZOOM », LA MESURE VIA LA SOURIS OU LES CALCULS ET ANALYSE (APPUI SUR BOUTON « ANALYSE »)



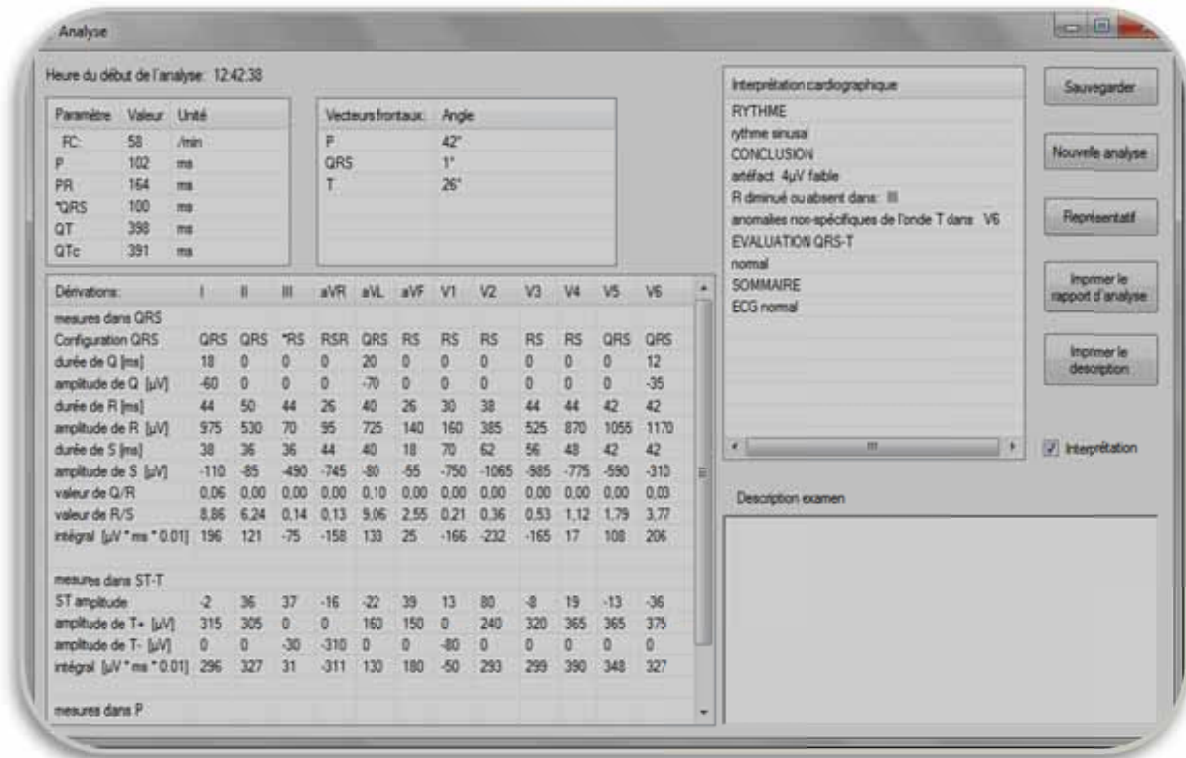

2.10. VOUS POUVEZ EDITER LE RAPPORT VIA LES ICONES D'IMPRESSON



2.11. VOUS POUVEZ AUSSI LAISSER FAIRE L'EXPORT AUTOMATIQUE DU RAPPORT A4 EN PDF (INTEGRATION AU DOSSIER MEDICAL PATIENT)

