


Suivez ces instructions étape par étape :

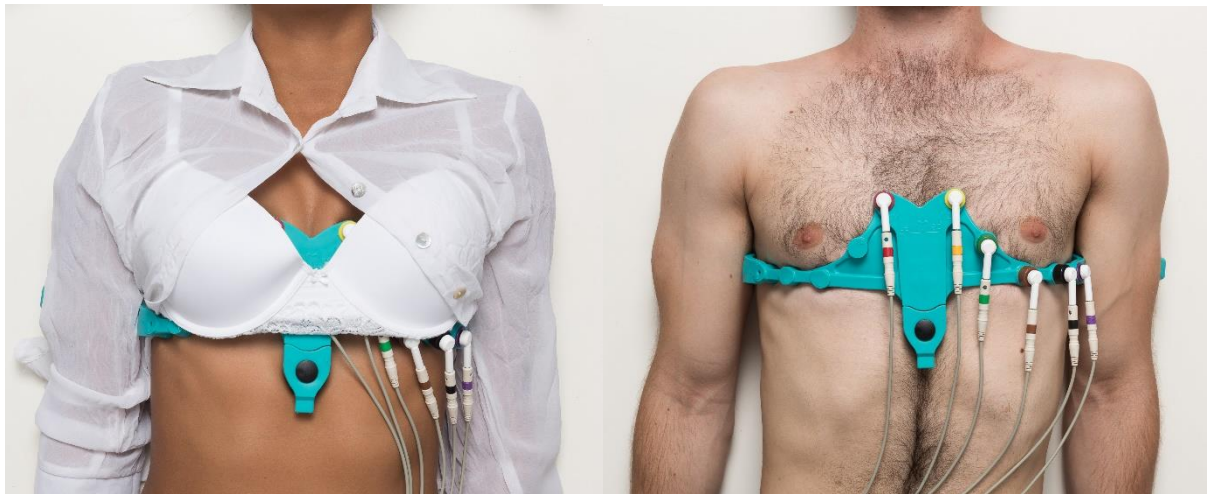

Ceinture ECG LevMed AllBrand™ avec anses

**Vérifiez que le câble patient ECG est  
connecté à l'appareil ECG.**

**Vérifiez que les vis sur la ceinture ECG sont fermement serrées :**



Connectez le câble patient ECG aux vis à l'aide des connecteurs à pression/à pince :

*Adaptateur de fiche  
banane à fiche à pression*



*Adaptateur de fiche banane à  
fiche à pince*



\*Si votre câble patient ECG possède des connecteurs à fiche banane, utilisez les adaptateurs fiche banane à fiche à pression, ou fiche banane à fiche à pince.


## Connectez le câble patient ECG à chacune des 4 électrodes à pinces :

**Pour les fiches banane du câble patient :**






1. Ouvrez la vis.
2. Insérez le connecteur banane
3. Fermez la vis.

**Pour les fiches à pression/à pince du câble patient :**

1. Fermez la vis.
2. Connectez la fiche à pression/à pince.

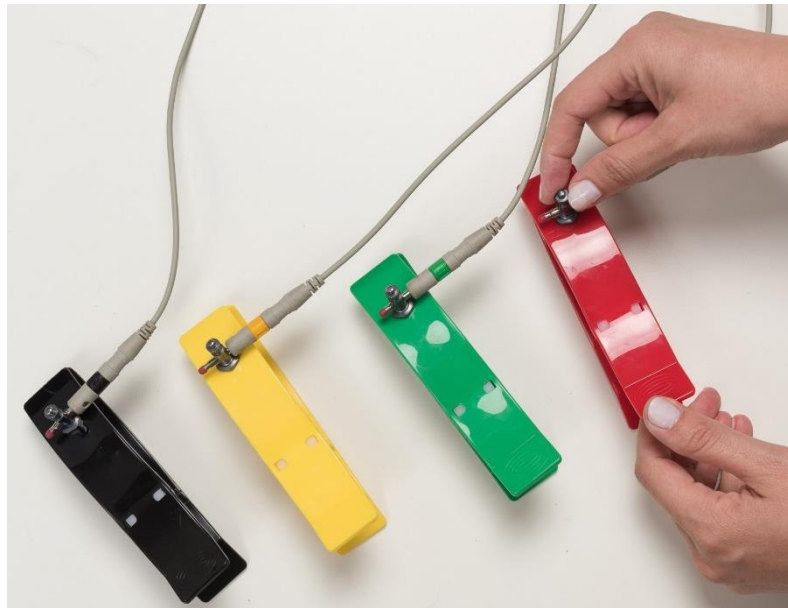


## Ouvrez ou retirez la chemise du patient :

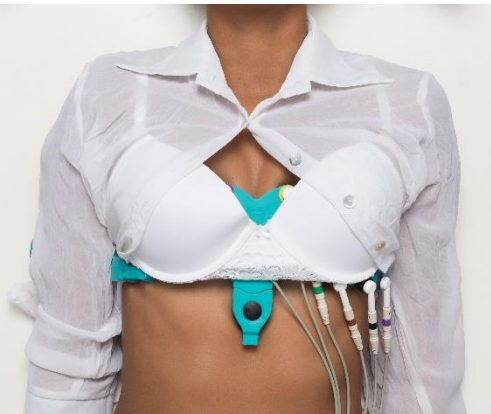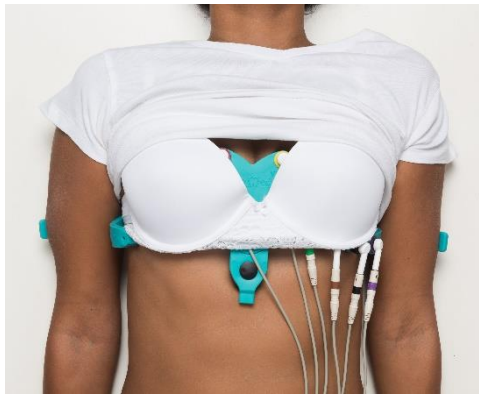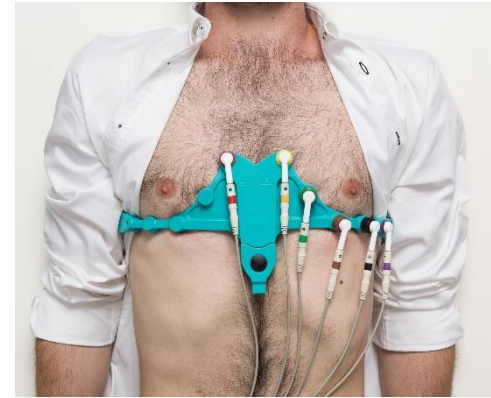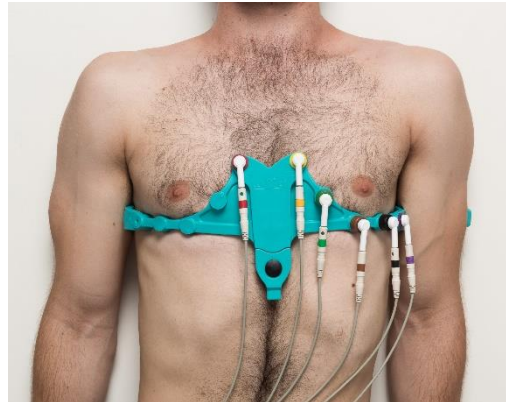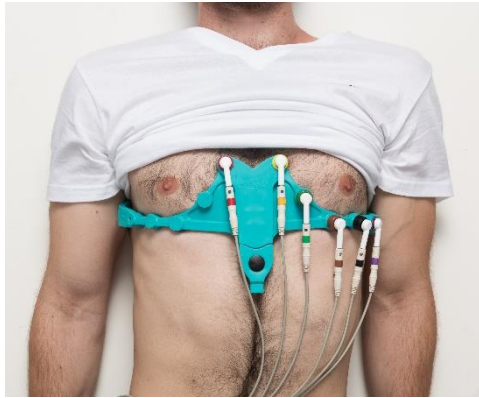



**Humidifiez les 6 électrodes (V1 à V6) avec de l'eau du robinet :**

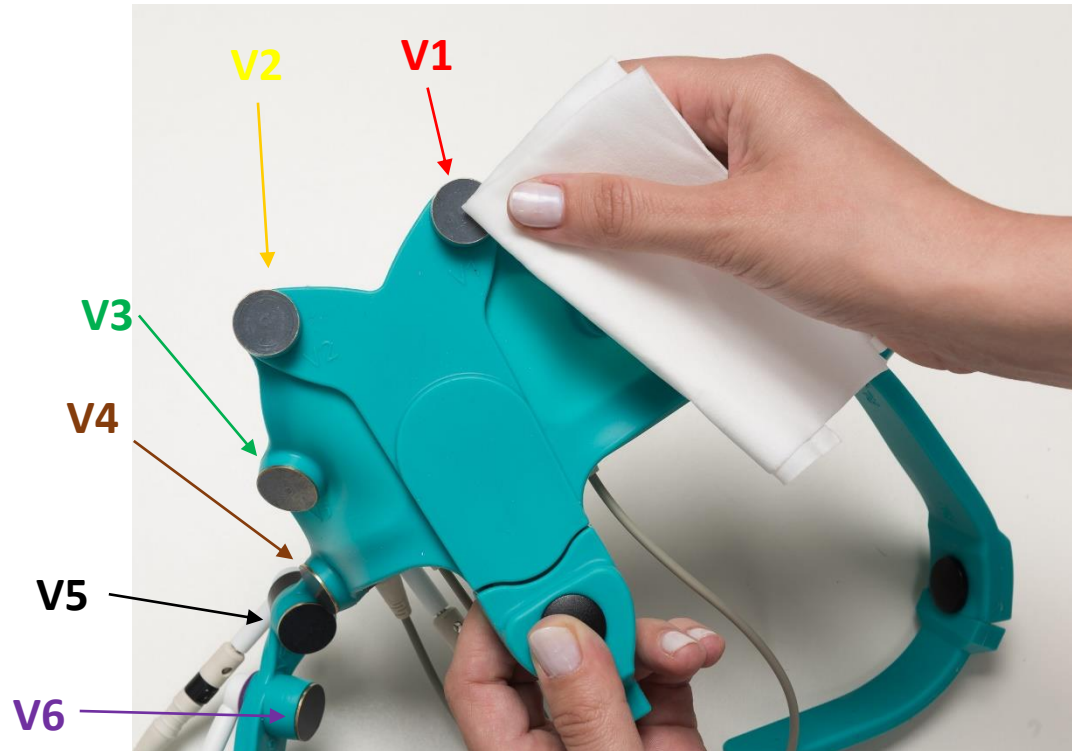

**Ajustez les anses gauche et droite et adaptez  
aux bras du patient :**






**Si nécessaire, inclinez V1 et V2 pour garantir le contact des électrodes avec la poitrine du patient :**



Lorsque le patient est confortablement allongé, appliquez la ceinture sur le torse du patient avec V1 et V2 symétriques des deux côtés du sternum :

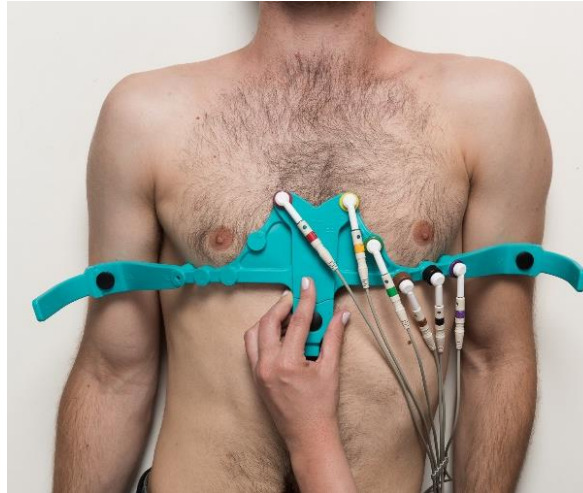

Remarque : Pour les femmes, la ceinture peut être appliquée sous le soutien-gorge :



**Appliquez les anses à mi-hauteur du bras,  
entre le coude et l'épaule :**




**Anse  
gauche**





**Anse  
droite**

Vérifiez que les électrodes V4, V5 et V6 se trouvent sous la poitrine :

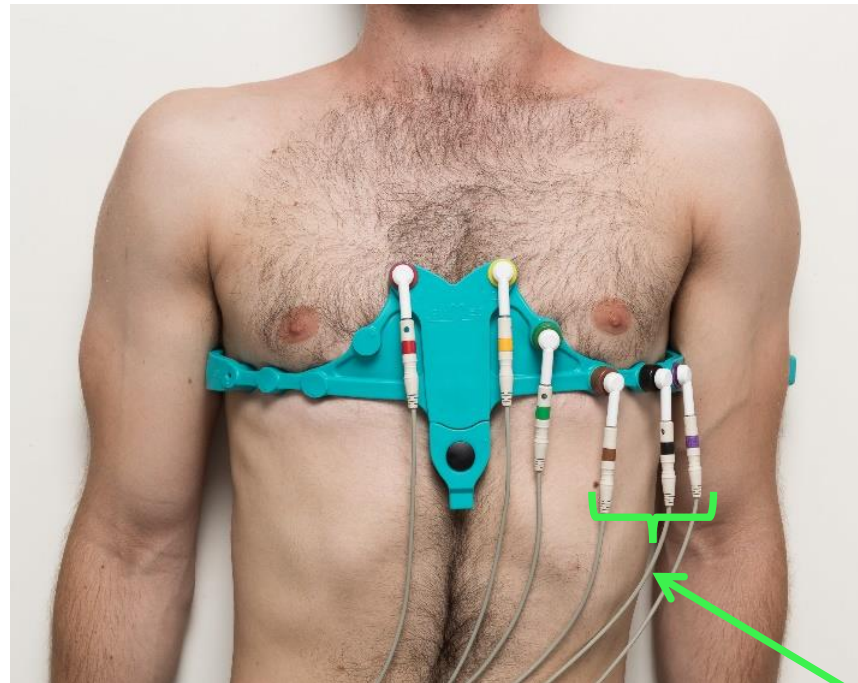


V4, V5, V6

**Assurez-vous que les 6 électrodes sont en contact avec la surface cutanée :**

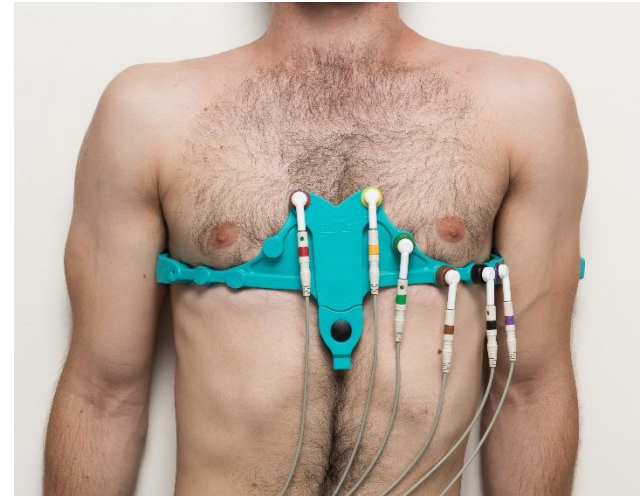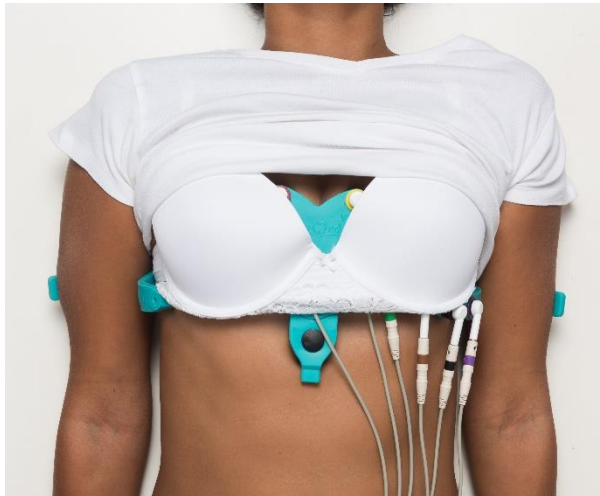

**Humidifiez l'électrode de chacune des 4 électrodes à pinces avec de l'eau du robinet :**

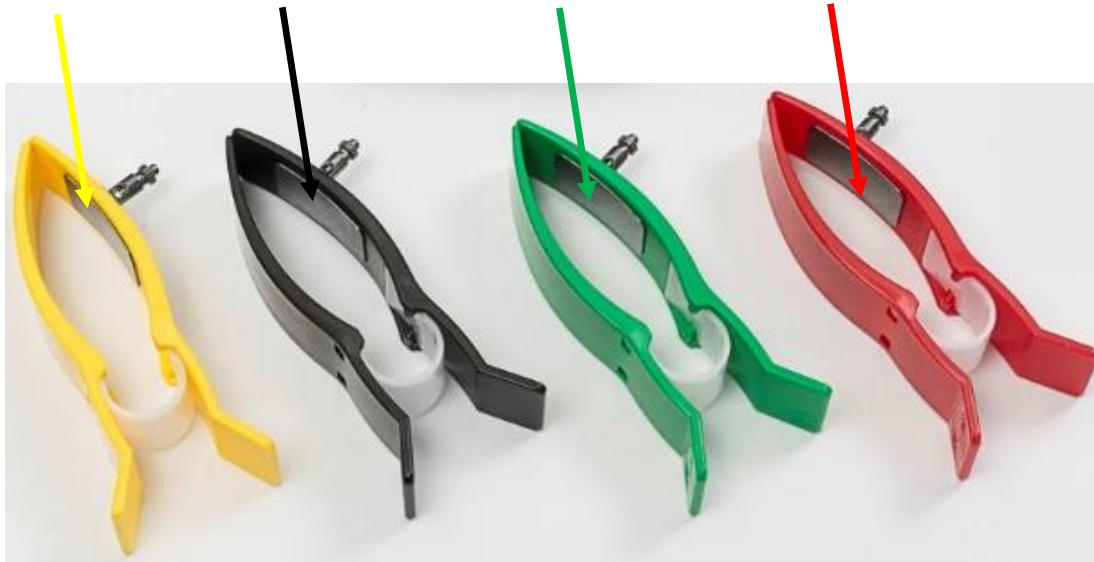



Appliquez les électrodes à pinces sur les membres :

**Rouge = Bras droit**

**Jaune = Bras gauche**

**Vert = Jambe gauche**

**Noir = Jambe droite**




**Assurez-vous que le patient est détendu et ne contracte pas ses muscles.**




**Demandez au patient de ne pas parler ni bouger pendant l'examen.**



**Remarque : Si plus confortable, l'examen peut être effectué lorsque le patient est en position assise :**

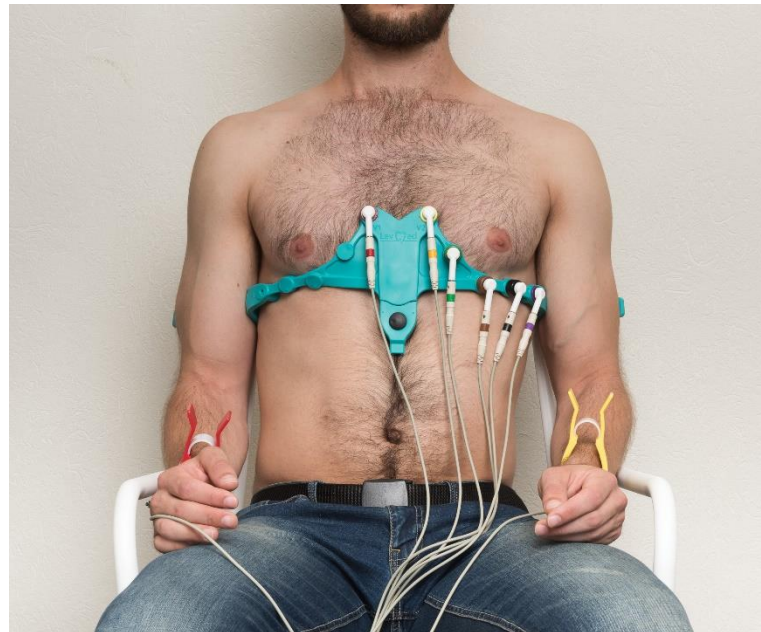

Appuyez sur « **Démarrer** » sur l'appareil ECG pour lancer l'acquisition ECG.

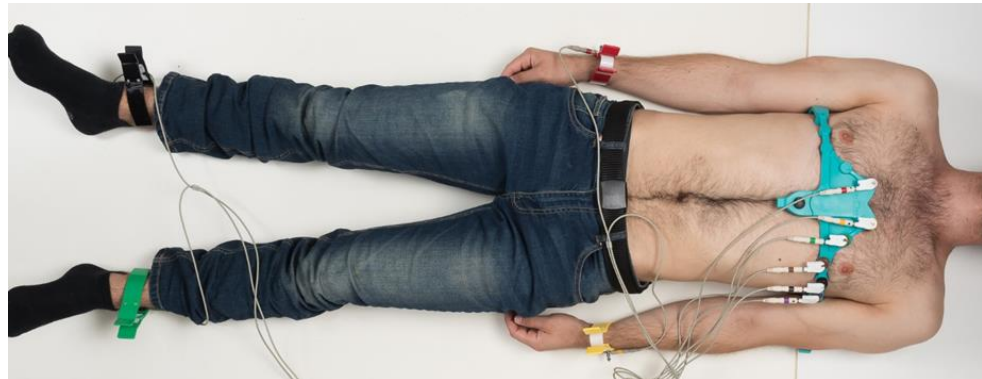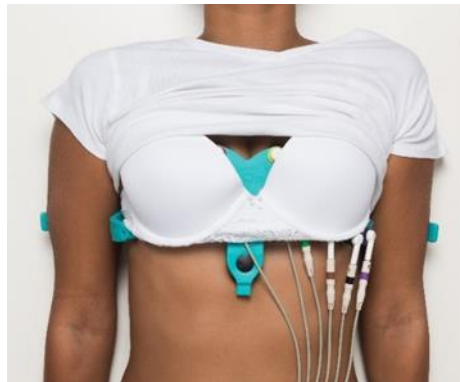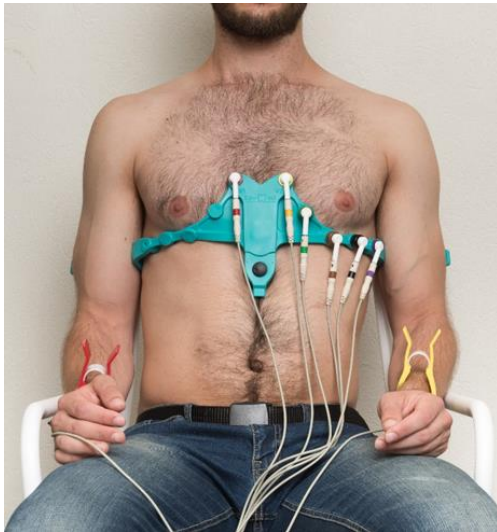

## Dépannage

**En cas de bruit sur le signal ECG, vérifiez les points suivants :**

1. De l'eau a été appliquée sur toutes les électrodes.
2. Toutes les électrodes sont en contact direct avec la surface cutanée.
3. Le patient est détendu, ses muscles ne sont pas contractés.





## **Merci d'utiliser la ceinture LevMed AllBrand™ ECG !**

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse  
[info@levmed.net](mailto:info@levmed.net)  
[www.levmed.net](http://www.levmed.net)