

AUDIOMETRE AMPLIVOX 116 --- GUIDE RAPIDE

1. Une fois l'alimentation secteur branchée à l'arrière de l'audiomètre (*ne pas confondre le secteur audio et le chargeur imprimante, vous pourriez faire des dégâts ...*), on allume en appuyant au moins 2 sec. sur « On/Off » à l'arrière.
2. A la fin, pour éteindre l'appareil, il ne faudra **JAMAIS** retirer le secteur (*si vous ne voulez pas endommager l'audiomètre*) mais : **touche MENU appuyée + YES.**
3. Les touches représentant **des flèches** servent à manipuler l'appareil (↓↑←→) en regardant sur l'écran l'intensité (en dB) et la fréquence (en KHz).
4. Le son est envoyé en appuyant sur **PRESENT** ; si le patient appuie sur le témoin, la diode **RESPONSE** s'allumera, sinon elle restera éteinte.
5. Pour régler le type de son envoyé dans le casque vous avez le choix entre un son pur, pulsé ou continu en appuyant sur la touche **PULSE/CONSTANT.**
6. Pour prendre note des résultats de seuil obtenu à chaque fréquence testée et pour chaque oreille, utilisez les fiches cartonnées d'audiogramme fournies (pensez à faire des photocopies à l'avance).
7. Si vous avez une imprimante compatible (Able ou Sanibel) vous pouvez éditer vos résultats mais avant cela : TOUJOURS bien enregistrer le seuil à chaque fréquence & chaque oreille (**LEFT** : gauche / **RIGHT** : droite) => Touche **PRINT.**

Pour d'autres fonctions et usages, voyez en détail le manuel d'utilisation complet.